

1. Kapsel öffnen und die benötigte Menge Pulver zum Anmischen auf eine sterile Platte geben.



2. Zement jeweils ca. 10 Sekunden portionsweise mit sterilem Wasser anmischen, bis die gewünschte Konsistenz des Zements für die gewählte Anwendung erreicht ist.



3. Wenn der Zement die gewünschte Konsistenz hat, ist er bereit zum Einfüllen; Verarbeitungszeit insgesamt ca. 5 Minuten.



Weitere Infos unter:

www.medcem.eu

www.medcem.ch